

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

Composite nano-optimizado, en capas de hasta 4 mm



Descubra el nuevo
más rápido
composite


ivoclar
vivadent
passion vision innovation

El composite más rápido

La limitación de tiempo cobra cada vez más importancia en la rutina clínica. Las obturaciones deben realizarse con rapidez, pero sin perder la estética. Esto puede parecer una contradicción, pero no lo es.

Con el nuevo composite para dientes posteriores Tetric® N-Ceram Bulk Fill, no hace falta renunciar a nada: las obturaciones se colocan en capas de hasta 4 mm de forma rápida y sencilla y se polimerizan en apenas diez segundos (utilizando lámparas de $> 1.000 \text{ mW/cm}^2$), para un resultado totalmente satisfactorio en la zona de los dientes posteriores.



Situación inicial



Aplicación de una capa de 4 mm.



Imagen final tras el pulido.
Imágenes: Dr. Michael Dieter



La nueva forma de aplicar capas

Hasta ahora, debía trabajarse laboriosamente aplicando varias capas de 2 mm hasta rellenar la cavidad. Con el composite Tetric N-Ceram Bulk Fill para dientes posteriores, ahora es posible aplicar capas de hasta 4 mm.

Gracias a su consistencia blanda, el material se puede trabajar y modelar de forma eficaz.



Capas convencionales de 2 mm



Capa de 4 mm con Tetric N-Ceram Bulk Fill

Un concepto muy bien pensado


Con Tetric N-Ceram Bulk Fill se obtienen resultados estéticos comparables en todos los aspectos a los resultados con composites convencionales. La profundidad de polimerización de 4 mm es posible gracias al nuevo fotoiniciador patentado Ivocerin.

Ivocerin es un potenciador de la polimerización mucho más reactivo que los iniciadores convencionales. Permite la polimerización segura en poco tiempo, incluso en cavidades profundas.

Para lograr resultados estéticos, el innovador composite para dientes posteriores ofrece tres colores universales una translucidez similar al esmalte de un 15%:

- IVA para dientes ligeramente enrojecidos
- IVB para dientes ligeramente amarillentos
- IVW blanco para obturaciones en dientes de leche y dientes muy claros


Nuevo iniciador Ivocerin

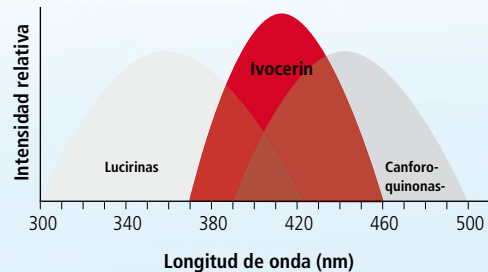


+ Sistema iniciador estándar Ivocerin
Polimerización de 4 mm segura

El composite flexible

A pesar del breve periodo de polimerización de tan solo diez segundos (> 1.000 mW/cm²) el tiempo de procesamiento de Tetric N-Ceram Bulk Fill es de hasta 200 segundos. El controlador de luz patentado protege de la luz ambiental y permite el modelado estético sin prisas. Para minimizar al máximo posible la reducción durante la polimerización, Tetric N-Ceram Bulk Fill cuenta con un componente especial que reduce y compensa las fuerzas ejercidas durante la contracción, tal y como resorte.

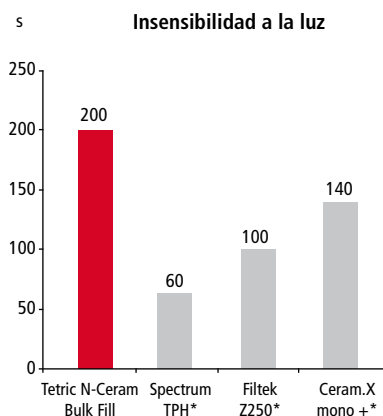

Medición según ISO 4049, F&E Ivoclar Vivadent AG, julio de 2012
 *Estas marcas no son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG.

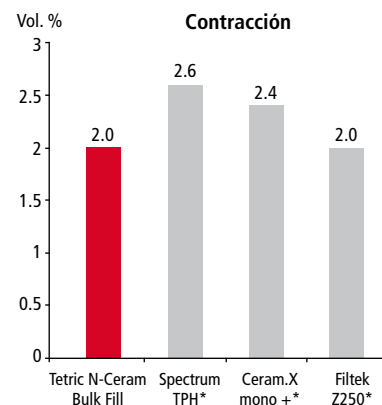

Medición según Watts, F&E Ivoclar Vivadent AG, julio de 2012
 *Estas marcas no son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG.

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

Composite nano-optimizado, en capas de hasta 4 mm

Eficacia en toda la línea

El composite Tetric N-Ceram Bulk Fill para dientes posteriores es ideal para la combinación con todos los productos de la colección Tetric N y permite obtener excelentes resultados en la zona de los dientes posteriores.



FORMAS DE SUMINISTRO

Art. No. Refill 1 x 3.5 g

- 644171 Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVA
- 644172 Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVB
- 644173 Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVW

Art. No. Refill 10 x 0.25 g

- 644174 Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVA
- 644175 Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVB
- 644176 Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVW

- 644153 Guía de colores



Es un producto de nuestra área de competencia "Composites". Los productos de esta área siempre están óptimamente adaptados entre sí.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Napoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 50 62 10 00
Fax +52 (55) 50 62 10 29
www.ivoclarvivadent.com.mx

ivoclar
vivadent
passion vision innovation